


GUNZE

NEOVEIL tube

吸収性組織補強材 自動縫合器対応 ネオベール[®] チューブ

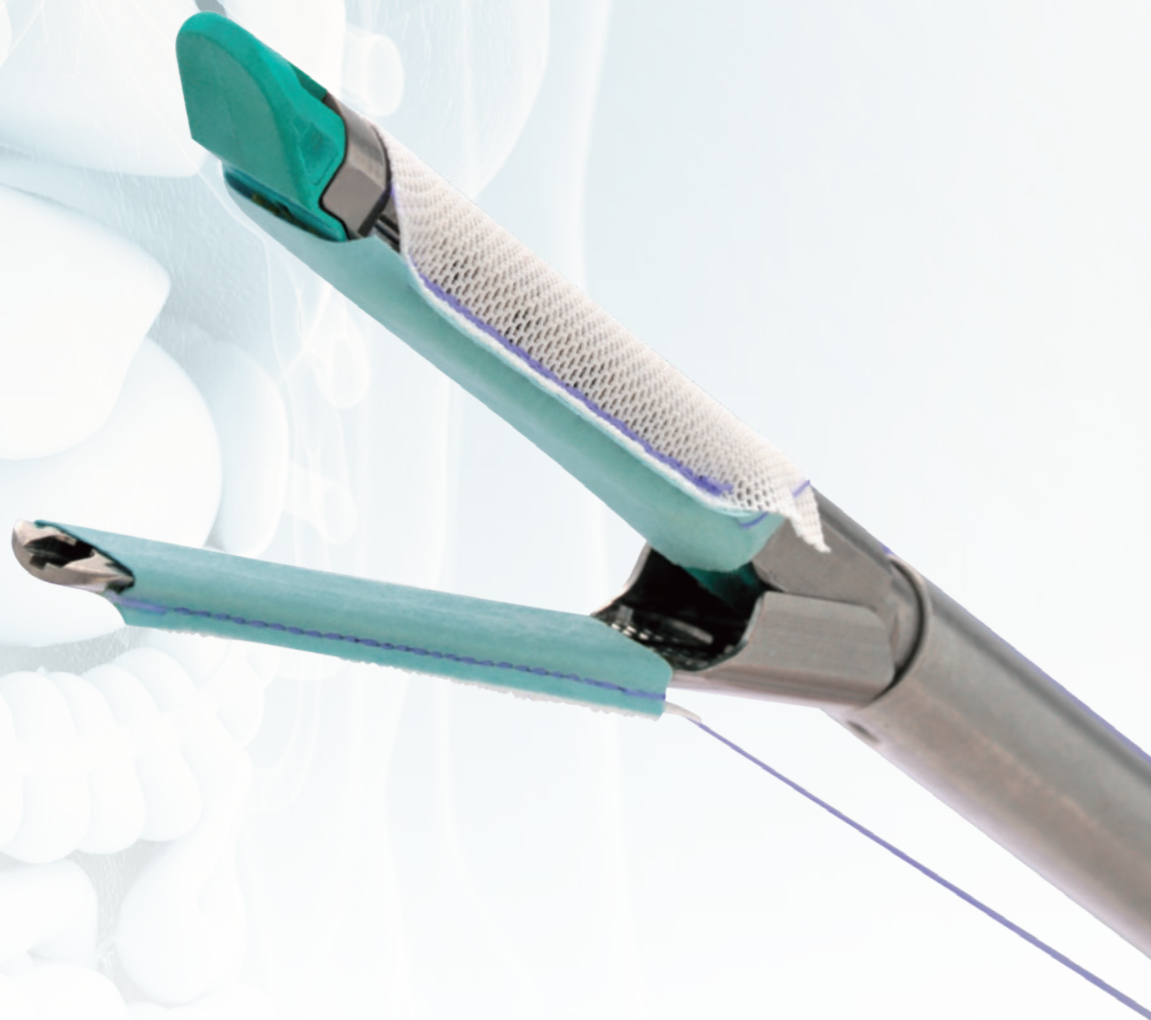

GUNZE MEDICAL

グンゼメディカル株式会社

NEOVEIL tube

特徴

- ・ポリグリコール酸 (PGA) を材料とした吸収性組織補強材です。
- ・生体反応により水と二酸化炭素に分解され、生体内で吸収されます。
- ・周辺の細胞が繊維間に浸潤し、製品が分解されるとともに生体組織が再生されます。



ネオベール® チューブ

構造


PGA 不織布 (緑色) と伸縮性ニット (ナイロンとポリウレタンから成る) を仮縫い糸で縫い合わせています。伸縮性ニットと仮縫い糸はファイヤー、カット後に術野から取り出します。

1袋内には大小1組が滅菌包装されています。幅の広い方 (大) がカートリッジ側、幅の狭い方 (小) がアンビル側です。

※製品の縫製形状や仮縫い糸は変更することがあります。

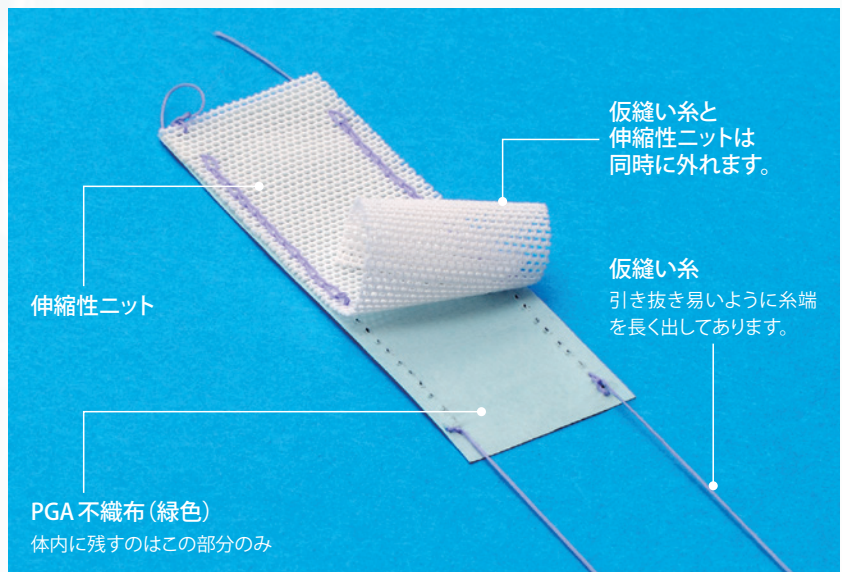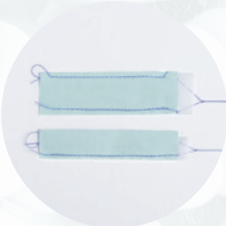

加水分解挙動 (参考値)

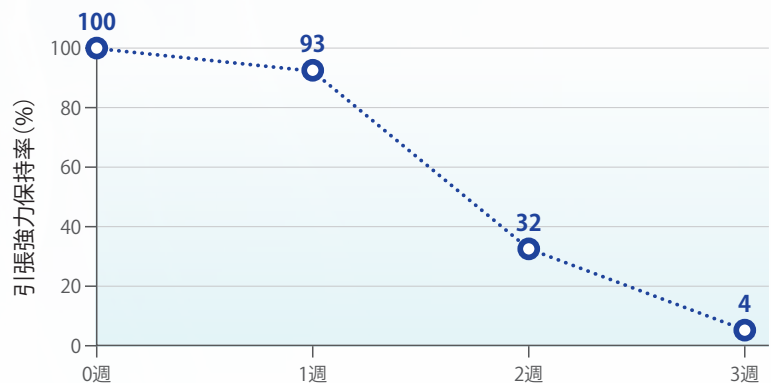

37℃生理食塩水浸漬期間

使用方法

1 ステープル選択上の注意点

本品により縫合部が多少厚くなることを考慮して縫合器のステープルを選択してください。



2 製品の装着

内袋の表示に従い、カートリッジ側とアンビル側に、それぞれステープル形成側(内側)にPGA不織布(緑色)がくるように製品を装着してください。

※ たるみ・ずれが生じないようにしてください。



3 縫合器の挿入

糸が絡まないように充分配慮しながら体内へ縫合器先端部を挿入してください。

※ 糸端を体外に残すようにしてください。



4 縫合器による挟み込み

縫合したい部分を縫合器ではさみ込んでください。組織の裏側に回した時等に、PGA不織布(緑色)がたるんだり、回転してずれることがありますので、もう一度装着状態が適切になるよう整えてください。

※ 仮縫い糸が挟み込まれないようにしてください。



5 ファイヤー、カット

通常の処置を行ってください。



6 仮縫い糸と伸縮性ニットの取り出し




仮縫い糸を引き抜いて、PGA不織布(緑色)と伸縮性ニットを分離し、仮縫い糸と伸縮性ニットを体外に廃棄してください。

※ 伸縮性ニットを挟み込んだ時は、はさみ等で分離し、体内にPGA不織布(緑色)以外の部分が残らないよう充分に注意してください。



7 縫合後

PGA不織布(緑色)の端がつながっている部分は、内視鏡下用剪刀等で切り離してください。

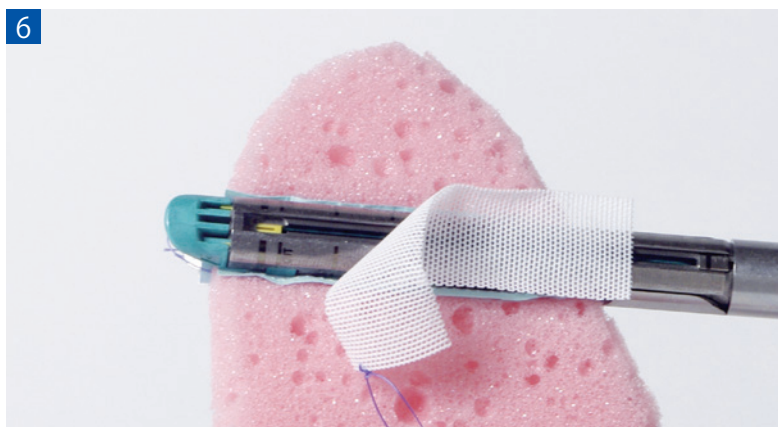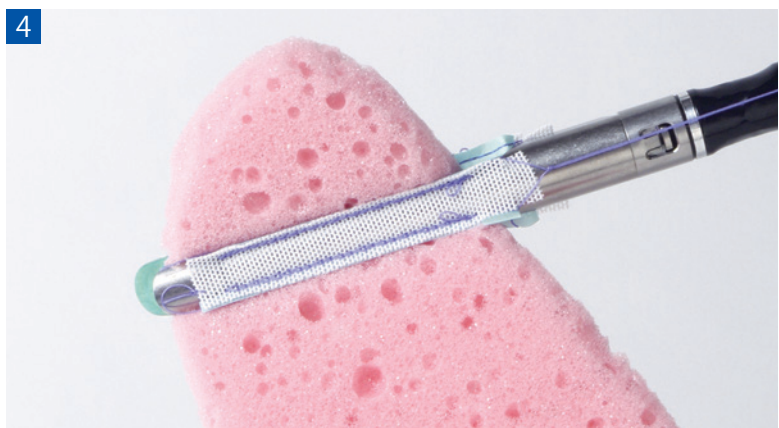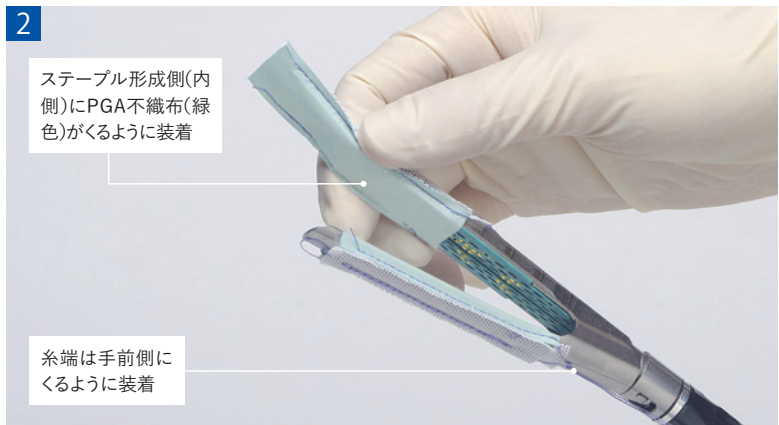

保険適用 (特定保険医療材料)

告示名：組織代用人工繊維布

機能区分：自動縫合器対応用

(略称：繊維布・自動縫合器)

※ご使用の際は添付文章をご参照ください。

商品一覧表

エチコン自動縫合器対応タイプ (包装:1セット/箱)

対応自動縫合器	商品番号
エンドパス®ステイプラー Powered ECHELON FLEX® 45 ECHELON FLEX® 45 ECHELON 45	NV-ET-M45E-2
エンドパス®ステイプラー Powered ECHELON FLEX® 60 ECHELON FLEX® 60 ECHELON 60	NV-ET-M60E-2

パッケージ



コヴィディエン自動縫合器対応タイプ (包装:1セット/箱)

対応自動縫合器カートリッジ	商品番号
エンド GIA™ トライステープル™ 45アーティキュレーティング エクストラシック (ブラック) エンド GIA™ ロティキュレーター™ 45カートリッジ(グリーン) エンド GIA™ II (ストレートタイプ) 45カートリッジ (グリーン)	NV-ET-M45E-2
エンド GIA™ トライステープル™ 60アーティキュレーティング エクストラシック (ブラック) エンド GIA™ ロティキュレーター™ 60カートリッジ(グリーン) エンド GIA™ II (ストレートタイプ) 60カートリッジ(グリーン)	NV-ET-M60E-2
エンド GIA™ トライステープル™ 45アーティキュレーティング ミディアム・シック (パープル) バスキュラー・ミディアム (キャメル) バスキュラー (グレー) エンド GIA™ ロティキュレーター™ 45カートリッジ(ブルー) (ホワイト) (グレー) エンド GIA™ II (ストレートタイプ) 45カートリッジ(ブルー) (ホワイト) (グレー)	NV-ET-M45A-2
エンド GIA™ トライステープル™ 60アーティキュレーティング ミディアム・シック (パープル) バスキュラー・ミディアム (キャメル) エンド GIA™ ロティキュレーター™ 60カートリッジ(ブルー) (ホワイト) エンド GIA™ II (ストレートタイプ) 60カートリッジ (ブルー) (ホワイト)	NV-ET-M60A-2

※対応機種欄に記載の縫合器には既に販売されていないものもあります。

販売名：ネオベール

高度管理医療機器 承認番号 20400BZZ00322000

使用目的又は効果：臓器・組織の縫合部、欠損部、脆弱部の補強、及び空気漏れの防止

製造販売業者

グンゼ株式会社

〒623-8513

京都府綾部市青野町藁ヶ市46

販売業者

グンゼメディカル株式会社

〒530-0003

大阪市北区堂島2丁目4-27 JRE堂島タワー5F

TEL 06-4796-3151 FAX 06-4796-3150

作成：2018年3月

改訂：2022年3月

改訂：2022年9月